

Absorbest Super

Gebrauchsanweisung

Indikationen:

Absorbest Super ist eine sterile, superabsorbierende Wundauflage zur Verwendung bei exsudierenden Wunden.

Produkteigenschaften:

Absorbest Super hat einen superabsorbierenden Kern, der Exsudat aufnimmt, bindet und zurückhält. Das Exsudat wird vertikal durch die Wundauflage aufgenommen und durch Gelbildung im Kern gebunden. So wird das Mazerationsrisiko der Haut am Wundrand minimiert und ein feuchtes Wundmilieu aufrechterhalten. Beide Produktseiten können auf die Wunde gelegt werden.

Gebrauchsanweisung:

Absorbest Super ist zur Behandlung von exsudierenden Wunden (bei Patienten ab 1 Jahr) vorgesehen und sollten von medizinischem Fachpersonal angewendet werden. Absorbest Super kann sowohl als Primär- als auch als Sekundärverband verwendet werden.

Reinigen Sie die Wunde gemäß dem vor Ort geltenden Protokoll. Trocknen Sie die umliegende Haut sorgfältig ab. Wählen Sie die Größe der Wundauflage entsprechend der Wundgröße aus. Der Kernbereich der Wundauflage sollte 2 cm über die Wunde hinausgehen, da die Ränder der Wundauflage kein Exsudat aufnehmen.

Absorbest Super muss direkten Kontakt zum Wundgrund oder der primären Wundauflage haben.

Fixieren Sie Absorbest Super. Absorbest Super kann auch im Rahmen einer Kompressionstherapie verwendet werden. Absorbest Super sollte in Abhängigkeit des klinischen Zustandes der Wunde gewechselt werden bzw. bevor die Wundauflage vollständig durchnässt ist. Verschlechtert sich der Zustand der Wunde, wenden Sie sich an Ihr medizinisches Fachpersonal. Das Entfernen der Wundauflage kann durch Anfeuchten der Wundauflage erleichtert werden. Die Wundauflage ist gemäß den vor Ort geltenden Bestimmungen als medizinischer Abfall zu entsorgen. Sollten schwerwiegende unerwünschte Ereignisse bei der Verwendung der Produkte auftreten, sind diese Absorbest AB und der zuständigen Behörde des jeweiligen Landes zu melden.

Vorsicht:

Die Wundauflage nicht zuschneiden, die Umhüllung muss intakt bleiben. Verwenden Sie die Wundauflage nicht, wenn die sterile Verpackung beschädigt ist. Produkt für den Einmalgebrauch, nicht erneut sterilisieren, kann nicht wiederverwendet werden.

Kontraindikationen:

Absorbest Super Wundauflagen dürfen nicht am Auge, auf Schleimhäuten, Sehnen, auf trockenen Wunden, oder in Wundhöhlen angewendet werden, weil die Wundauflage durch die Flüssigkeitsaufnahme aufquillt. Absorbest Super Wundauflagen dürfen nicht bei Personen mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber der Wundauflage oder ihren Bestandteilen verwendet werden.




Nicht wiederverwenden. Die Wiederverwendung führt zu Kreuzkontamination.



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.



Nicht zuschneiden.

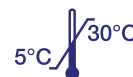

Absorbest AB
Klintvägen 1
SE-590 39 Kisa
Sweden
info@absorbest.se
www.absorbest.com

