

DryMax Blue

Bruksanvisning

Avsedd användning och indikationer:

DryMax Blue är ett sterilt superabsorberande sårförband avsett för vätskande sår.

Produktegenskaper:

DryMax Blue har en superabsorberande kärna som absorberar och behåller sårvätska inuti förbandet. Sårvätskan tas upp vertikalt i förbandet genom dess vita sida. Sårvätskan hålls kvar inuti förbandet och bildar en gel, vilket minimerar risken för maceration och skador på omgivande hud samt bibehåller en fuktig sårmiljö. DryMax Blue har en färgad hydrofob baksida (sidan uppåt) som minimerar fuktläckage genom förbandet.

Användarinformation:

DryMax Blue ska användas på vätskande sår (patienter från 1 år och äldre) och hanteras av sjukvårdspersonal. Förbandet kan användas antingen som primärförband eller sekundärförband. Rengör såret enligt gällande rutiner. Torka omgivande hud försiktigt. Välj storlek på förbandet efter sårets storlek; förbandets kärna ska överlappa såret med 2 cm marginal eftersom förbandets kanter inte absorberar sårvätska. Placera förbandet med vita sidan nedåt i direkt kontakt med sårytan eller primärförbandet. Fixera förbandet på lämpligt sätt. Förbandet kan användas tillsammans med kompressionsbehandling. Förbandet ska bytas med hänsyn till sårets kliniska tillstånd eller innan förbandet är mättat. Kontakta sjukvårdspersonal om sårets tillstånd förvärras. Förbandet kan lättare avlägsnas om det fuktas. Förbrukade förband sorteras som brännbart avfall. Vid risk för smittspridning, följ lokala föreskrifter.

Om en allvarig incident har inträffat i samband med användning av någon av produkterna, ska detta rapporteras till Absorbest AB och behörig myndighet i det aktuella landet.

Observera:

Klipp inte i förbandet, det yttre skiktet måste behållas intakt. Använd inte förbandet om sterilförpackningen är skadad. Engångsprodukt, får ej återsteriliseras, ska ej återanvändas. Observera att den vita sidan av förbandet ska läggas mot såret!

Kontraindikationer:

DryMax Blue-förband ska inte användas på ögon, slemhinnor, senor, torra sår, eller i sårhålur eftersom förbandet sväller i takt med absorptionen. DryMax Blue-förband ska inte användas om personen har en känd överkänslighet mot förbandet eller dess komponenter.



Återanvänd ej. Återanvändning orsakar korskontaminering.



Använd inte om sterilbarriären eller förpackningen är skadad.



Klipp inte.



Absorbest AB
Klintvägen 1
590 39 Kisa
Sverige
info@absorbest.se
www.absorbest.com

