

UrgoSuperSuperabsorber

PL SUPERCHŁONNY OPATRUNEK DO STOSOWANIA NA RANY Z WYSIĘKIEM

Instrukcja i wskazania do stosowania:

UrgoSuperSuperabsorber to sterylny, superchłonny opatrunek do stosowania na rany z wysiękiem.

Właściwości produktu:

UrgoSuperSuperabsorber zawiera superchłonną warstwę, która pochłania i zatrzymuje wysięk. Wysięk jest pochłaniany przez opatrunek pionowo od strony białej, stykającej się z raną i jest zatrzymywany w warstwie chłonnej tworząc żel, co minimalizuje ryzyko maceracji skóry wokół rany, przy jednoczesnym utrzymaniu wilgotnego środowiska rany.

UrgoSuperSuperabsorber zawiera hydrofobową, niebieską warstwę zewnętrzną, która minimalizuje ryzyko przesiąkania wilgoci, oraz białą warstwę kontaktową, która umożliwia bezurazowe usuwanie opatrunku.

Instrukcja stosowania:

UrgoSuperSuperabsorber należy stosować na rany z wysiękiem (pacjenci od 1. roku życia i starsi) i powinien być stosowany pod nadzorem personelu medycznego. UrgoSuperSuperabsorber może być stosowany jako opatrunek pierwotny lub wtórny. Należy oczyścić ranę zgodnie z lokalnym protokołem. Ostrożnie osuszyć skórę wokół rany. Wybrać rozmiar opatrunku w zależności od wielkości rany; krawędź części chłonnej opatrunku powinna zachodzić na ranę z 2 cm marginesem, ponieważ krawędzie

uszczelniające nie pochłaniają wysięku. Nałożyć UrgoSuperSuperabsorber, umieszczając białą stronę w bezpośrednim kontakcie z łóżyskiem rany lub opatrunkiem pierwotnym. Zabezpieczyć produkt w miejscu aplikacji. UrgoSuperSuperabsorber można stosować w połączeniu z terapią kompresyjną. UrgoSuperSuperabsorber należy zmieniać w zależności od stanu klinicznego rany i objętości wysięku. Jeśli stan rany się pogarsza, należy skonsultować się z personelem medycznym. Zdejmowanie opatrunku można ułatwić poprzez jego zwilżenie. Zużyty opatrunek należy utylizować zgodnie z lokalnymi regulacjami. W przypadku wystąpienia poważnego działania niepożądanego, w związku z użytkowaniem któregośkolwiek z wyrobów, należy to zgłosić do firmy Absorbest AB i do właściwych organów krajowych.

Środki ostrożności dotyczące stosowania:

Nie przecinać opatrunku, aby nie pozbawić go właściwości chłonnych. Nie stosować opatrunku, w przypadku uszkodzenia sterylnego opakowania. Produkt jednorazowego użytku, nie poddawać

ponownej sterylizacji, nie używać ponownie. Ważne jest, aby nakładać opatrunek, umieszczając go białą stroną w bezpośrednim kontakcie z łóżyskiem rany lub opatrunkiem pierwotnym.

Przeciwwskazania:

UrgoSuperSuperabsorber nie należy stosować na oczy, błony śluzowe, ścięgna, na rany suche lub rany w jamach ciała, ponieważ opatrunek pęcznieje podczas pochłaniania wysięku. UrgoSuperSuperabsorber nie powinien być stosowany u osób o potwierdzonej nadwrażliwości na opatrunek lub jego składniki.



Nie używać ponownie. Powtórne użycie opatrunku do jednorazowego użytku może wiązać się z ryzykiem zakażenia.



Nie używać, jeśli sterylna bariera lub opakowanie zostały uszkodzone



Nie przecinać

CE 2862    Data ostatniej rewizji: 2025-10-09



 Absorbest AB • Klintvägen 1 • SE-590 39 Kisa, Szwecja • www.absorbest.com

 Dystrybutor: **URGO Sp. z o.o.** • Aleje Jerozolimskie 142 B • 02-305 Warszawa
tel. (22) 616-33-48